


Prueba IDEXX Cancer Dx™

interpretación del resultado en perros clínicamente enfermos

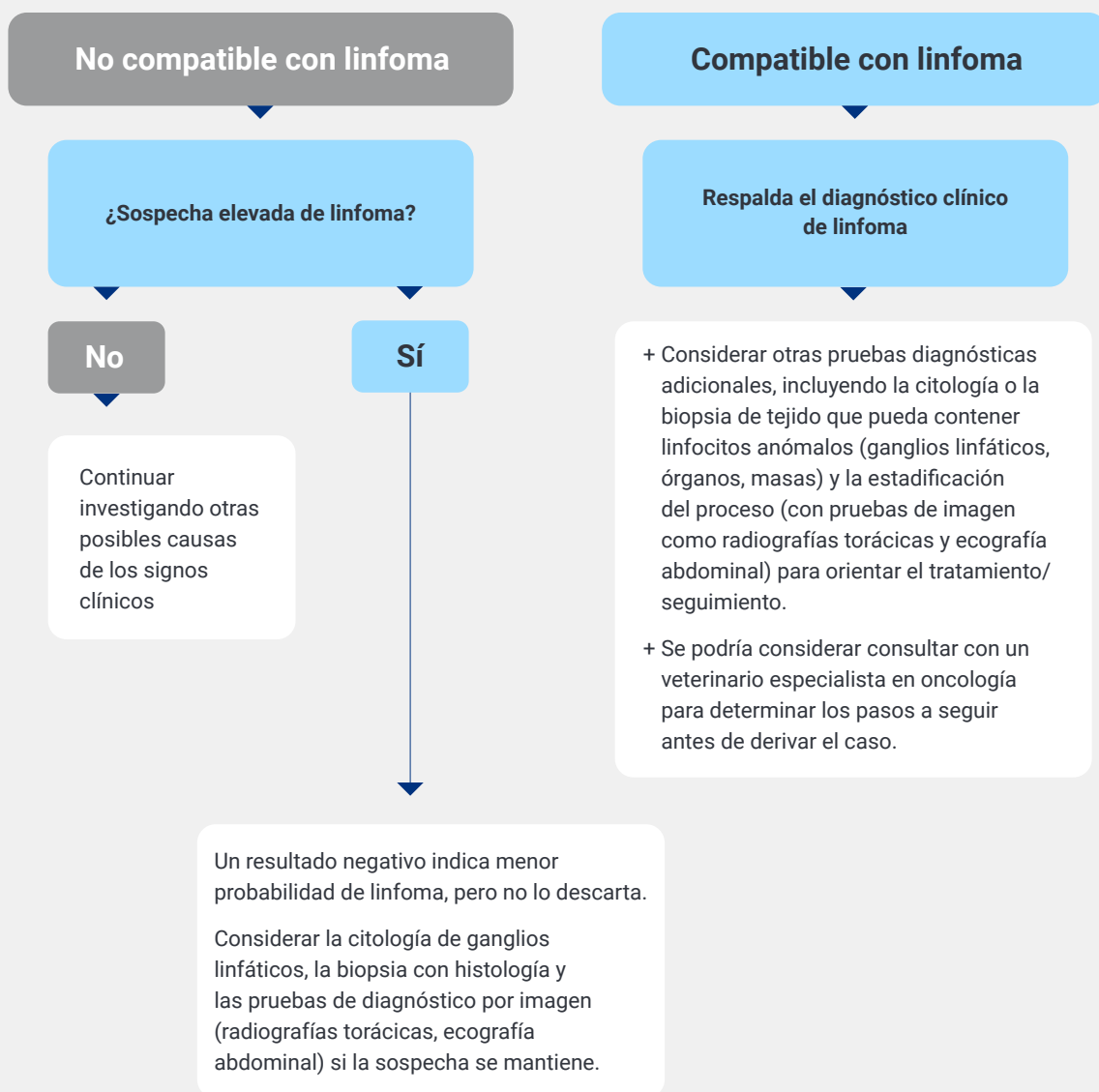

Prueba IDEXX Cancer Dx™

interpretación del resultado en perros clínicamente sanos

No compatible con linfoma

El resultado respalda la ausencia de linfoma detectable; evaluar al paciente en la siguiente revisión prevista*

Compatible con linfoma

Evaluar los datos de la historia completa, la exploración física y la analítica sanguínea.

Se puede considerar la investigación adicional para confirmar la enfermedad mediante las siguientes pruebas:

- + Aspirado o biopsia de los ganglios linfáticos/órganos
- + Diagnóstico por imagen (radiografías torácicas y ecografía abdominal)
- + Citometría de flujo en casos de linfocitosis

Si no se detecta linfoma, repetir la exploración física en una consulta de seguimiento a las 8-12 semanas (o antes si aparecen signos nuevos)

* La American Animal Hospital Association (AAHA), recomienda realizar revisiones de salud cada 6 meses en perros sénior y una vez al año en los demás perros.¹

Referencia

1. Creevy KE, Grady J, Little SE, et al. 2019 AAHA Canine Life Stage Guidelines. *J Am Anim Hosp Assoc.* 2019;55(6):267–290. doi:10.5326/JAAHA-MS-6999