


Prueba Catalyst Cortisol

Desbloquee los comentarios interpretativos específicos sobre los resultados

Los comentarios interpretativos facilitados con la prueba Catalyst™ Cortisol pueden ayudarle a determinar cuáles deben ser las próximas medidas más adecuadas para su paciente. Para aprovechar al máximo esta información, tenga en cuenta estas preguntas y, a continuación, siga los pasos siguientes:

- + **¿Realizará varias pruebas de cortisol en el mismo paciente?** En caso afirmativo, y si ya ha realizado una prueba de cortisol inicial, siga las instrucciones **"para pruebas adicionales..."** que aparecen a continuación para asegurarse de que cada resultado cuantitativo se agrupe secuencialmente y para acceder a los **comentarios interpretativos exhaustivos**.
- + **¿Ha introducido la información del protocolo?** Para recibir comentarios interpretativos específicos sobre los resultados, debe seleccionar el protocolo y el paso de protocolo adecuados para el análisis del paciente; asegúrese de seguir el flujo de trabajo específico del analizador a continuación:

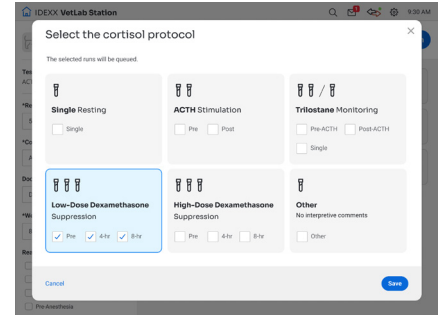

Para pruebas de cortisol iniciales

Analizador de bioquímica Catalyst One™



Inicie el análisis en la IDEXX VetLab™ Station. En la pantalla Seleccionar instrumentos, pulse **Catalyst One** y, a continuación, pulse **Cortisol**. Seleccione el protocolo deseado y los pasos de protocolo adicionales, pulse **Guardar** y, a continuación, pulse **Analizar**.

Para pruebas adicionales/pruebas de cortisol de varios pasos

Todos los pasos de protocolo que se seleccionaron cuando se procesó la prueba inicial aparecen en la lista En curso de la pantalla de inicio de la IDEXX VetLab Station. Cuando sea el momento de procesar la siguiente muestra, pulse la siguiente prueba disponible de la lista, pulse **En cola** y, a continuación, pulse **Iniciar análisis**.

Analizador bioquímico Catalyst Dx™



Inicie el análisis en su IDEXX VetLab Station como lo haría normalmente. Cuando finalice el análisis, identifique el protocolo y el paso de protocolo cuando el sistema se lo solicite y, a continuación, pulse **Enviar**.

Nota: Si decide introducir el protocolo/paso de protocolo más tarde, pulse el paciente en la lista En curso, pulse **Añadir detalles** y, a continuación, seleccione la información de protocolo del paciente.

Para garantizar que los resultados adicionales se agrupen con el resultado inicial y de recibir comentarios interpretativos:

1. Encuentre el resultado inicial de cortisol del paciente en la IDEXX VetLab Station **O** seleccione el paciente correspondiente en la lista de pendientes de la pantalla de inicio.
2. Pulse **Añadir análisis** y, a continuación, pulse **Adjuntar resultados**.
3. En la pantalla Seleccionar equipos, elija la opción **Catalyst Dx**.
4. Cuando el sistema se lo solicite al final del análisis, seleccione la información de protocolo del análisis y, a continuación, pulse **Enviar**.

IMPORTANTE: Si tiene un analizador Catalyst One y un analizador Catalyst Dx y tiene la intención de establecer una tendencia de los resultados de cortisol de un paciente y/o realizar pruebas adicionales/pruebas de cortisol de varios pasos, IDEXX recomienda que todas las pruebas de cortisol se realicen con el mismo analizador y con el mismo tipo de muestra.

Para ver los resultados cuantitativos y los comentarios interpretativos

Pulse el mensaje en la esquina inferior izquierda de su IDEXX VetLab Station, que indica que los resultados del paciente están listos. Cuando se añaden pruebas adicionales como resultado de una prueba de cortisol de varios pasos, los resultados se presentan de la última prueba adicional (en la parte superior) a la prueba inicial (en la parte inferior); los comentarios interpretativos exhaustivos aparecen con los resultados más recientes.