

# Leishmaniosis

## Prueba SNAP\* *Leishmania* o prueba SNAP\* Leish 4Dx\*

Perro clínicamente sano en una zona endémica, antes de la vacunación y el cribado de viaje

Perro con signos clínicos compatibles

**Negativo**

**Positivo**

**Negativo**

En el caso de un perro asintomático, repetir la prueba cada 6-12 meses; considerar la vacunación y la profilaxis contra los mosquitos (flebotomos)

Serología cuantitativa, hemograma, perfil bioquímico con SDMA, análisis de orina con ratio UPC, electroforesis de proteínas

Alta sospecha de leishmaniosis

Si los signos clínicos y otros resultados clinicopatológicos son compatibles con leishmaniosis y la serología cuantitativa es baja o negativa, considerar citología/histología, prueba PCR†

**Compatible con leishmaniosis:** estadificar y tratar según pautas publicadas‡ considerar seguimiento\* al cabo de 1, 3<sup>s</sup> y 6 meses

**No compatible con leishmaniosis:** considerar otros diagnósticos diferenciales; repetir la prueba cada 6-12 meses; considerar la vacunación y la profilaxis contra flebotomos

\*Tipos de muestra recomendados: médula ósea, ganglio linfático, bazo, piel o hisopos conjuntivales.

‡Más información sobre la estadificación clínica, el tratamiento y el pronóstico de la leishmaniosis, en el sitio web de LeishVet: [leishvet.org/fact-sheet/clinical-staging](http://leishvet.org/fact-sheet/clinical-staging).

§Serología cuantitativa recomendada 3 meses después del inicio del tratamiento y luego cada 6-12 meses.