

Prueba SNAP de la *Leishmania*

Exactitud de la prueba

Sensibilidad y especificidad de la prueba SNAP de la *Leishmania*

Analito	Método de referencia (IFA ¹)	Resultado de la prueba SNAP de la <i>Leishmania</i>		Total	Sensibilidad (IC del 95 %)
		+	-		Especificidad (IC del 95 %)
<i>Leishmania infantum</i> ¹	+	83	5	88	98,8% (93,5%–100%)
	-	1	268	269	98,2% (95,8%–99,4%)

Tabla 1. Prueba SNAP de la *Leishmania* en comparación con los métodos de referencia.¹

Referencia

¹. Data on file at IDEXX Laboratories, Inc. Westbrook, Maine USA.