




Analizador SNAP Pro

El analizador SNAP Pro* es una herramienta de automatización para realizar pruebas en animales que envía los resultados al expediente médico electrónico del paciente, ahorrando tiempo y dinero. Cuando se lanzó SNAP Pro, usted obtuvo las ventajas de la automatización, pero todavía tenía que introducir manualmente los resultados de las pruebas SNAP*. Con la nueva función ProRead* del analizador SNAP Pro*, los resultados de las pruebas SNAP se leen automáticamente, ahorrándole otro paso del proceso de trabajo con SNAP y aportando aún más valor al SNAP Pro.

Visualización de los resultados de ProRead

Realice la prueba SNAP utilizando el proceso de trabajo que prefiera. Una vez finalizado el análisis observará que la pantalla de resultados tiene un aspecto parecido al que tenía sin la función ProRead. La diferencia está en que ahora se le facilitan los resultados y usted ya no tiene que leer la ventana de resultados e introducir los positivos y negativos.

Además de la automatización de los resultados, el color de la luz de estado del analizador varía en función de los mismos. Si la luz de estado es:

- **Verde:** todos los resultados son negativos.
- **Azul:** al menos un resultado es positivo.
- **Amarilla:** es posible que haya que verificar el resultado debido a puntos muy claros o al desarrollo de colores imprevistos (como desechos o tinte azul) en la ventana de resultados. Si está de acuerdo con los resultados que se muestran, pulse el icono  de **marca de verificación** para guardar el resultado. Si no, pulse el icono del resultado correspondiente y luego el icono  de **marca de verificación**. Para cancelar el test y volver a la pantalla de Inicio, pulse el icono  de cerrar.

Estado **verde** = todos los resultados son **negativos**.

Estado **azul** = al menos un resultado es **positivo**.

Estado **amarillo** = se precisa la interacción del usuario para finalizar el procesamiento.

El color de la luz de estado indica el estado del resultado.



Los resultados positivos se marcan en rojo.

Los resultados se guardan automáticamente.



¿Necesita ayuda?
Contacte al **Servicio Técnico de IDEXX** al **34 932 672 660** o al **34 916 376 317**.